

改良型新製品

調節式長下肢装具

超早期からのリハビリに！
立位・歩行訓練用「リハ室備品」

ADアジャストKAFO

- 左右兼用/2サイズで多くの患者に適合
- 適合時間の短縮、工具無しで全てを調節可能
- 膝継手はSPEXまたはリングロックの選択式
- 従来型KAFO Ver.2をより使いやすく改良



機能

- ①SPEX膝継手(Spring Extension)は、筋力の回復に応じた伸展補助力の微調整が可能です
※スプリングを付属のスチールロッドに入れ替えることで伸展角度調整が可能です
- ②リングロック膝継手の選択で確実な固定が可能です
- ③足継手はWクレンザック(スチールロッド)を採用、角度調整はノブ式で容易です
- ④膝継手の高さはプランジャとロック用ノブネジにより調節します(2cm毎表示付き)
- ⑤大腿と下腿の半月幅の調整はスライド式、ノブねじで固定します



①SPEX膝継手



②リングロック膝継手



③Wクレンザックノブ



④膝継手高さ調節



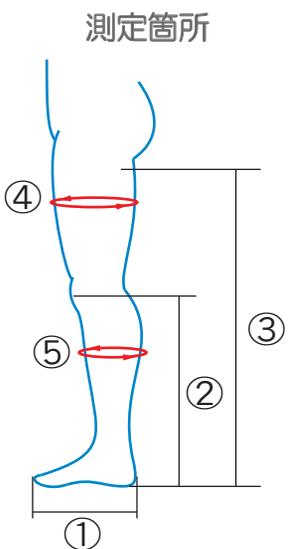
⑤カフの幅調整

KAFO Ver.2からの改良点

- ①足底厚さを50mmから25mmに変更し、補高靴が不要になりました
- ②新形状の足首ベルトを採用し足部の固定力を高めました
- ③大腿・下腿カフベルト、膝当てベルトをより堅牢なものに変更しました
- ④大腿カフを2分割式に変更し、幅調整が容易になりました
- ⑤SPEX膝継手の伸展調整ネジに補助力の目安となる数字の刻印を追加しました



①足底の厚さ変更 ②新形状足首ベルト ③ベルト変更 ④2分割式大腿カフ ⑤伸展調整ネジ目盛

測定部位	Mサイズ	Lサイズ	測定箇所 
① 足長(実寸)	20.0cm~23.0cm	23.0cm~26.0cm	
② 下腿長(足底~膝関節)	37cm~45cm	44cm~52cm	
③ 装具高さ(足底~大腿カフ上縁)	62cm~70cm	71cm~79cm	
④ 大腿カフ部 周径	35cm~50cm	38cm~53cm	
⑤ 下腿カフ部 周径	27cm~33cm	30cm~36cm	
適応身長	145cm~160cm	160cm~180cm	
適応体重	75kg以下	90kg以下	
装具重量「SPEX継手」	2160g	2400g	
装具重量「リングロック継手」	1960g	2200g	

膝継手	Mサイズ品番	Lサイズ品番
SPEX	A-1511	A-1512
リングロック	A-1521	A-1522

アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地
TEL (0965) 33-3992
FAX (0965) 32-1492

E-mail info@advanfit.co.jp

URL <http://www.advanfit.co.jp>